

# ORIGIO® Sequential Blast™

## 胚盤胞用メディウム

### プロトコール

1. 本製品をご使用前に少なくとも 2 時間、5-6%CO<sub>2</sub>、37°Cで平衡化を行ってください。完全に平衡化されるには培養液とカバーオイルの量により要する時間が異なります。
2. 胚を予め平衡化された本製品で注意深く洗浄してから、同じく平衡化された本製品の新鮮なドロップもしくはウェルに移してください。
3. 胚は Day5/6 で胚盤胞になるまで、一日おきに新鮮なドロップに移してください。

