

# Quinn's Advantage™ Cleavage Medium

分割胚用メディウム

## プロトコール

1. 本製品はご使用前に少なくとも 2 時間、5-6%CO<sub>2</sub>、37°Cで平衡化を行ってください。完全に平衡化されるには培養液とカバーオイルの量により要する時間が異なります。本製品には HSA もしくは SPS などの血清蛋白の添加が推奨されます。
2. 胚を受精用メディウムから予め平衡化された本製品のドロップもしくはウェルに移し、ディッシュをインキュベーターに戻してください。



CooperSurgical®  
Fertility Solutions