

Quinn's Advantage™ Protein Plus Blast Medium

胚盤胞用メディウム(血清含有)

プロトコール

1. 本製品はご使用前に少なくとも 2 時間、5-6%CO₂、37°Cで平衡化を行ってください。完全に平衡化されるには培養液とカバーオイルの量により要する時間が異なります。本製品は血清含有のため、添加は不要です。
2. 胚を予め平衡化された本製品で注意深く洗浄してから、同じく平衡化された本製品の新鮮なドロップもしくはウェルに移してください。
3. 胚は Day5/6 で胚盤胞になるまで、一日おきに新鮮なドロップに移してください。



CooperSurgical®
Fertility Solutions