

Quinn's Advantage™ Protein Plus Cleavage Medium

分割胚用メディウム(血清含有)

プロトコール

1. 本製品はご使用前に少なくとも 2 時間、5-6%CO₂、37°Cで平衡化を行ってください。完全に平衡化されるには培養液とカバーオイルの量により要する時間が異なります。本製品は血清含有のため、添加は不要です。
2. 胚を受精用メディウムから予め平衡化された本製品のドロップもしくはウェルに移し、ディッシュをインキュベーターに戻してください。



CooperSurgical®
Fertility Solutions