

# SAGE 1-Step™

## シングルステップメディアウム



### プロトコール

1. 本製品をご使用前に少なくとも 2 時間、5-6%CO<sub>2</sub>、37°Cで平衡化を行ってください。胚発生に合わせ pH が 7.3±0.1 の範囲となるよう、pH を計測し CO<sub>2</sub> 濃度を調整することが推奨されます。
2. 胚を受精用メディアウムから予め平衡化された本製品のドロップもしくはウェルに移し、ディッシュをインキュベーターに戻してください。
3. 本製品はメディアウムチェンジ不要です。

