

SAGE 1-Step™ with GM-CSF

GM-CSF 含有シングルステップメディウム

プロトコール

1. 本製品はご使用前に少なくとも 2 時間、5-6%CO₂、37°Cで平衡化を行ってください。胚発生に合わせ pH が 7.3±0.1 の範囲となるよう、pH を計測し CO₂ 濃度を調整することが推奨されます。
2. 胚を受精用メディウムから予め平衡化された本製品のドロップもしくはウェルに移し、ディッシュをインキュベーターに戻してください。
3. 本製品はメディウムチェンジ不要です。



CooperSurgical®
Fertility Solutions