

SynVibro® Flush

卵子洗浄・フラッシング用メディウム

プロトコール

1. SynVibro® Flush は予め 37°C に加温してからご使用ください。
2. SynVibro® Flush は 37°C のヒートブロックなどに入れ、採卵から培養室へ卵子を移動させるまでのすべてのプロセスで保温し続けてください。
3. 卵胞洗浄用のシリンジを SynVibro® Flush で満たしておきます。吸引した卵胞液と同量の SynVibro® Flush で卵胞を洗浄してください。卵胞を元の大きさ以上に拡張させないよう注意してください。
4. 卵子を SynVibro® Flush もしくは平衡化したメディウムで洗浄し、血液を取り除いてください。
5. 予め 37°C 5-6% CO₂ で平衡化した培養液に卵子を移してください。

