

Universal IVF Medium

受精用メディウム

プロトコール

1. 本製品をご使用前に、37℃、CO₂ 下で少なくとも 2 時間の平衡化を行ってください。
2. 媒精は、採卵から 4 時間以内に本製品を用いて行います。媒精の方法は、各施設のプロトコールや患者背景によって異なりますが、一般には、前培養しておいた卵子に約 100,000/mL の運動精子を加え、再びインキュベートします。ICSI を行う場合は、インジェクション後、すぐに卵子を本製品または胚培養液に移します。
3. 16-20 時間後に前核を確認した後、その胚をメディウムで洗浄してから、0.5mL / ウェルあるいは 50 μ L マイクロドロップの培養液中へ移し、培養を行います。個別培養もしくは最大 4 個 / ウェルでの胚培養を推奨致します。

