

ウォーレス・リング・ペッサリー 子宮下垂/子宮脱治療用リング




子宮脱治療用にデザインされた製品です。
膣を支えることで子宮が下垂するのを防ぎます。

ペッサリーを挿入することで、膀胱と腸への圧迫を軽減します。
また、子宮変位を矯正し、尿道を圧迫することが原因の
腹圧性尿失禁を軽減することもできます。

特徴

- ・常温で柔らかく、挿入しやすく患者さまへの痛みが緩和。
- ・材質に弾力性があり、さらにリングの肉厚により、子宮を支えます。
- ・豊富なサイズバリエーションで患者さまにあったサイズ選択が可能。
- ・材質はポリ塩化ビニル(可塑剤:フタル酸ジ-2-エチルヘキシル)。

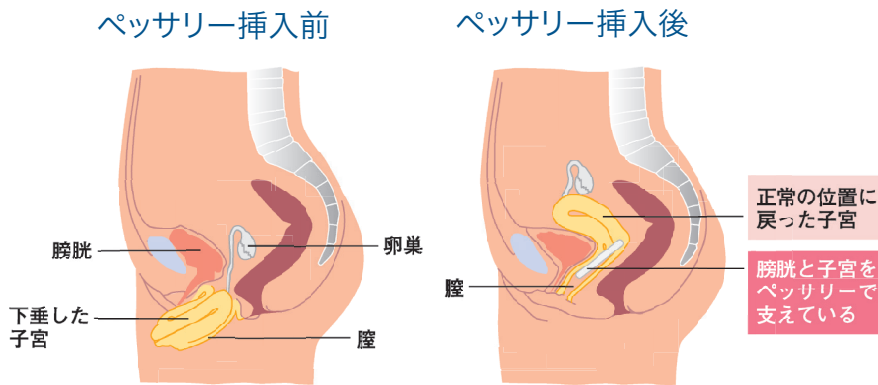

ご使用に際しての注意事項

- ・本製品は未滅菌で出荷されていますが、クリーンルームで製造されているので、パッケージから取り出して直ぐにそのままお使いいただけます。消毒や滅菌をする必要はありません。
- ・リング・ペッサリーをお湯(滅菌液)で暖めると、より柔軟性が増し、挿入し易くなります。
- ・使用するサイズは2本の指を膣内に挿入し、その指を広げて膣壁に接触させ、そのままの状態でも膣内から抜いて測定します。測定したサイズと同等の外径のリング・ペッサリーを選択します。日本人の平均サイズは65-74 mmです。
- ・本製品は挿入後2～3ヶ月毎に取り出し、膣内の接触面を必ず観察してください。
- ・本製品は単回使用製品です。
- ・本製品をオートクレーブ(高圧蒸気)で滅菌しないでください。製品の変形や破損につながる可能性があります。オートクレーブやガス滅菌、プラズマ滅菌などをした際の製品の安全性は検証されていません。
- ・本製品に金属は含まれていません。本製品を装着したままMRI検査を受けても磁気誘引の危険は増加しません。

製品のパッケージ・仕様等は改良のため予告なく変更させていただきます。予めご了承ください。

ご使用の前に製品添付文書を必ずお読みください。

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
製造販売元

スミスメディカル・ジャパン株式会社
〒107-0052 東京都港区赤坂7-1-1

販売元

オリジオ・ジャパン株式会社
〒231-0021
神奈川県横浜市中区日本大通11
横浜情報文化センター4F
【お問い合わせ電話番号】 045-319-6826
【注文用ファックス番号】 045-319-6581
www.origio-japan.com

代理店名



品番	製品名/外径サイズ(mm)	包装単位
700/300/XXX (XXXはサイズの種類)	リング・ペッサリー (50 / 53 / 56 / 59 / 62 / 65 / 68 / 71 / 74 / 77 / 80 / 85 / 90 / 95 / 100 / 110)	1箱(2個入り)

*未滅菌、原材料：ポリ塩化ビニル

販売名：ウォーレス・リング・ペッサリー
承認番号：22000BZX01121000

©2017 ORIGIO Japan Ltd. All Rights Reserved.



CooperSurgical Fertility Companies