


# Инструкция по замене поршня СТРИППЕРА-ПГД

## Стриппер-ПГД

Замена поршня (см. рисунок ниже) Необходима деталь MXL3-PLG-PGD

Для того чтобы заменить поршень, отвинтите основание от корпуса: держите СТРИППЕР-ПГД за корпус и поворачивайте основание против часовой стрелки до тех пор, пока оно полностью не отделится от корпуса.

Затем, зажимая в руках упор для пальца и корпус, поворачивайте упор для пальца против часовой стрелки до тех пор, пока корпус не отделится. Аккуратно снимите корпус с пружиной - при этом станет видно кольцо с установочными винтами. С помощью имеющегося у Вас инбусового (шестигранного) ключа отвинтите оба установочных винта и удалите старый поршень. Поместите новую деталь в канал поршня (конец поршня должен дойти в канал до упора). Завинтите установочные винты. Осторожно надвиньте корпус с пружиной обратно, **стараясь не изогнуть новый поршень**. Привинтите основание и упор для пальца к корпусу с пружиной. **Внимание: Не является необходимым и не рекомендуется откручивать упор для пальца или крышку основания.**

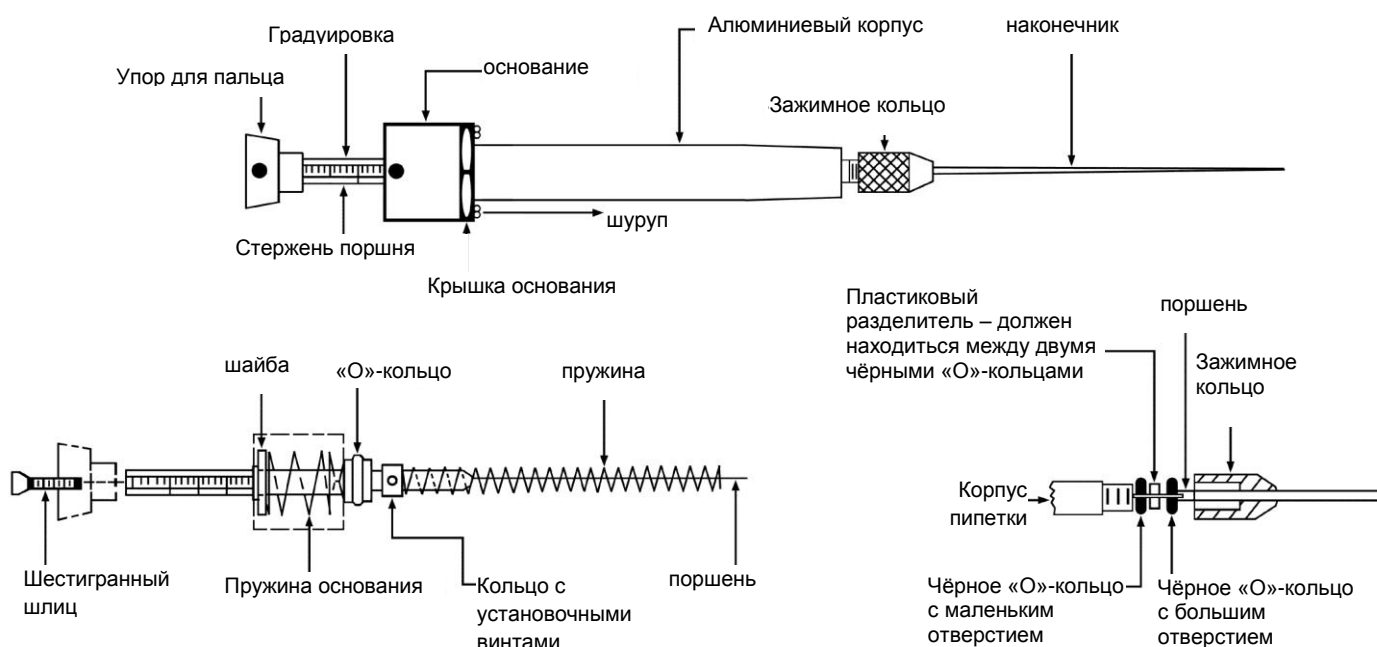

Производитель:

**ORIGIO MidAtlantic Devices**

77 Elbo Lane, Mount Laurel NJ 08054

Представительство в России:

**ООО «ОРИДЖИО»**

196158, Санкт-Петербург

Пулковское шоссе 40/4 литер А

(812) 318-02-90.

[Info-ru@origio.com](mailto:Info-ru@origio.com)

[www.origio.com](http://www.origio.com)

Видео по замене поршня:

<http://origio.com/Download%20Center/Marketing%20Material/Videos/Stripper%20O%20ring.aspx>